



INSTRUÇÕES DE USO

POLTRONA PARA COLETA DE SANGUE SUPRA

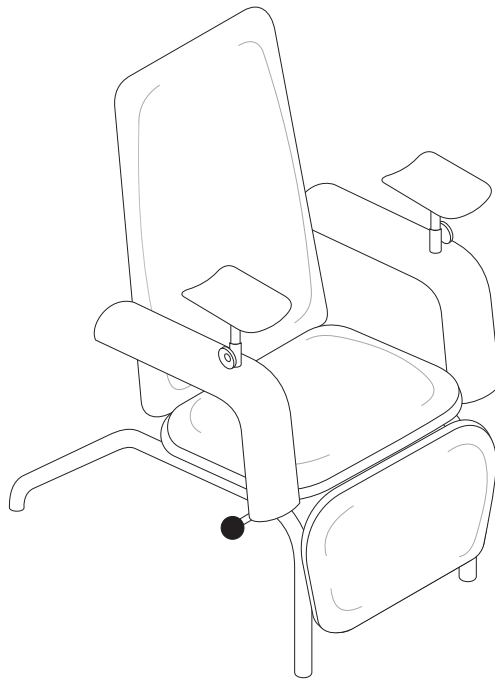

**ATENÇÃO!****ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO, LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL.**

1. Produto	1
1.1. Ficha técnica Poltrona para Coleta de Sangue Supra	1
2. Instruções de segurança	2
2.1. Precauções	2
2.2. Cuidados de transporte e armazenamento	2
3. Instruções de uso	2
3.1. Como reclinar a poltrona	2
3.2. Regulagem do suporte para braço	2
4. Manutenção	3
4.1. Limpeza e conservação	3
4.2. Manutenção preventiva	3
4.3. Assistência técnica	3
5. Fabricante	3
5.1. Informações do fabricante	3
6. Garantia	4
6.1. Validade da garantia	4
6.2. Condições de garantia	4
6.3. Outras informações sobre garantia e assistência técnica	4
Formulário de Informações da Garantia	5

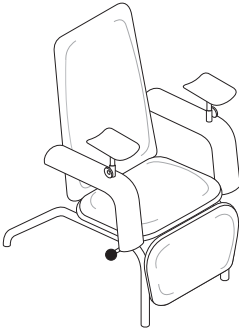
NOME COMERCIAL		Cama Hospitalar Manual Supra 205 - 1 movimento cremalheira
CARACTERÍSTICAS GERAIS: <ul style="list-style-type: none"> - Estrutura fabricada predominantemente em aço carbono ligas SAE 1010 e SAE 1020, que possui excelente composição química e propriedades mecânicas; - Leitos e estrutura com acabamento em pintura eletrostática BRANCA; - Sistema articulável; - Estofado revestido em corvin; EMBALAGEM: <ul style="list-style-type: none"> - Produto embalado com plástico bolha, papelão ondulado e filme <i>stretch</i>. 		
MEDIDAS	POSIÇÃO SENTADA	Largura: 68cm Comprimento: 95cm Altura: 120cm
	POSIÇÃO RECLINADA	Largura: 68cm Comprimento: 160cm Altura: 60cm
MECANISMO		Cremalheira
PESO MÁXIMO		130Kg
AMBIENTE		Produto destinado para uso em ambiente interno: hospitais, clínicas, consultórios e residências.
USO		Produto estacionário. Não use para transporte de paciente.
USUÁRIO		Adultos
OPERAÇÃO		Adultos estão aptos a operar a cama após lerem as instruções deste manual.
PRAZO DE VALIDADE		Indeterminado

2. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA


2.1. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES



→ **NÃO** realize esforços concentrados no espaldar da poltrona.

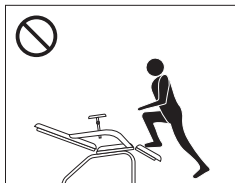

→ **NÃO** realize esforços concentrados na pesseira da poltrona.

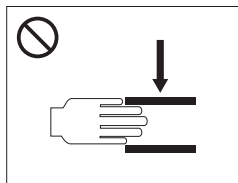

→ **NÃO** coloque as mãos entre as frestas dos estofados.



→ **NÃO** exponha o produto ao sol ou intempéries.



ATENÇÃO!

Faça inspeções mensais no equipamento e a qualquer sinal de defeito suspenda o uso e entre em contato com a **SUPRA STEEL**

2.2. ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE



Armazene ao abrigo da umidade




Evite exposição direta ao sol por longos períodos



Mantenha longe de produtos corrosivos


3. INSTRUÇÕES DE USO

3.1. COMO RECLINAR A POLTRONA

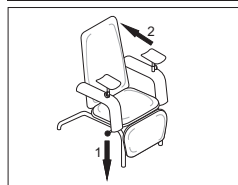

RECLINANDO A POLTRONA:


- Empurre a alavanca para baixo (1) e o espaldar para trás (2);
- Solte a alavanca;

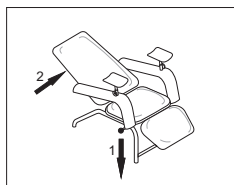

VOLTANDO PARA A POSIÇÃO SENTADA:

- Empurre a alavanca para baixo e libere o espaldar, empurrando-o para cima.
- Solte a alavanca.

3.2. REGULAGEM DO SUPORTE PARA BRAÇO

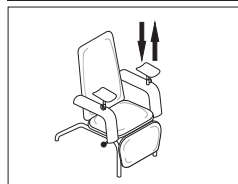

- Para elevar ou abaixar o suporte para o braço, desrosqueie o manípulo;
- Posicione o suporte na altura desejada;
- Rosqueie o manípulo novamente.

4.1. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

- Utilize um pano umedecido com água e sabão neutro para executar a limpeza e, em seguida, passe um pano seco e macio para enxugar;

- Não utilize produtos químicos corrosivos ou abrasivos;

COLCHÃO:

- A limpeza deve ser feita com pano umedecido com água e detergente neutro;

- Recomenda-se girar o colchão no sentido horizontal a cada 3 (três) meses de uso;

- Não expor o colchão ao sol e intempéries.

4.2. MANUTENÇÃO PREVENTIVA

- Lubrifique mecanismos e articulações da cama pelo menos 1 (uma) vez ao mês. Recomenda-se o uso de desengripante.

- Em região litorânea a frequência de lubrificação deve ser a cada 15 (quinze) dias.

**ATENÇÃO!**

Faça inspeções mensais no equipamento e a qualquer sinal de defeito suspenda o uso e entre em contato com a **SUPRA STEEL**

4.3. ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Entre em contato com a **SUPRA STEEL** *



(41) 3663-7507 / 3663-8265



Rua Ângela Guidolin da Silva, n.º 35, barracões 23, 24 e 25
Centro - CEP 83414-070 - Colombo-PR -



assistencia@suprasteel.com.br



de segunda a quinta das 08:00 às 17:00 / sextas-feiras das 08:00 às 16:00

***Tenha em mãos a Nota Fiscal de compra do produto** (caso seja necessário obter a segunda via, entre em contato com a loja onde foi efetuada a compra).

5. FABRICANTE**5.1. INFORMAÇÕES DO FABRICANTE**

Metalúrgica Supra Stell Ltda.

CNPJ 32.330.070/0001-02

Rua Ângela Guidolin da Silva, n.º 35 - Centro

CEP. 83.414.070 - Colombo/Paraná

Telefone: (41) 3663-7507

Responsável Técnico: Gislande Silva Jardim - CRF-MG: 7528

Responsável Técnico: Moyses Maia Viana - CREA-PR: 171142/D

AFE N.º 8.20.987-1

6.1 VALIDADE DA GARANTIA

A **SUPRA STEEL** oferece garantia de:

- 1 (um) ano para partes metálicas, mecanismos e acessórios;
- 6 (seis) meses para colchões;
- 90 (noventa) dias para capas de colchões;

Asseguramos total garantia contra defeitos de fabricação durante o período supra citado;

O prazo começa a contar a partir da data de recebimento do produto;

A nota fiscal é um documento imprescindível para qualquer procedimento relacionado a cobertura de garantia e assistência técnica;

Ainda que a garantia tenha sido expirada, seu produto poderá receber assistência técnica seguindo critérios e valores a serem analisados por nossos colaboradores;

Ao primeiro sinal de qualquer tipo de problema ou dúvida com relação ao funcionamento do produto entre em contato com nosso departamento responsável por assistência técnica (vide contato no campo “assistência técnica”).

6.2 CONDIÇÕES DA GARANTIA

IMPLICAM PERDA DA GARANTIA:

- Qualquer dano causado por reparos e alterações conduzidas pelo cliente ou técnico não autorizado;
- Inobservância das instruções e precauções indicadas neste manual;
- Uso de produtos químicos, corrosivos ou abrasivos;
- Exposição a intempéries ou calor e umidade excessivos;
- Perfurações, riscos, amassamentos, quebras, rompimentos, corrosões e quaisquer danos ocasionados por mau uso.

6.3 OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

- Caso a cobertura da garantia tenha expirado, a manutenção será feita através de avaliação e orçamento, com valores a serem aprovados e pagos pelo cliente;
- Podem haver situações em que o problema poderá ser solucionado sem a necessidade de envio do produto para o fabricante. Nestes casos, as peças a serem substituídas serão enviadas, assim como um técnico será acionado para realizar o serviço (o que será analisado pelo departamento responsável);
- A **SUPRA STEEL** não se responsabiliza pela disponibilização de cama reserva durante o período de manutenção;
- A garantia e manutenção de algumas peças como, por exemplo, os motores e atuadores dependem da análise e garantia do fornecedor. Neste caso, é o próprio fornecedor quem estipula o prazo para manutenção.



FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES DE GARANTIA SUPRA STEEL

Esses são os dados que vamos precisar em caso de acionamento de assistência técnica:

Nome: _____

Telefone: _____

Endereço: _____

E-mail: _____

Data da compra: _____

Nome do revendedor: _____

Telefone do revendedor: _____

Número da nota fiscal: _____

Número do lote: _____

IMPORTANTE:

Guarde esse certificado de garantia em local seguro para referência futura.
Recomenda-se anexar a nota fiscal a este formulário.

MODELOS DISPONÍVEIS

Poltrona para coleta de sangue Supra – com apoio regulável para braço
Poltrona para coleta de sangue Supra – sem apoio regulável para braço

Metalúrgica Supra Steel Ltda.
CNPJ 32.330.070/0001-02
Telefones: (41) 3663-7507 / (41) 3663-8265
Rua Ângela Guidolin da Silva, 35 - Barracões 23, 24 e 25
Centro - CEP: 83.414-070 - Colombo - PR
AFE N.º 8.20.987-1
Registro: 82098710003

Poltrona para Coleta de Sangue Supra - V1 - 02/2021
Projeto: Poltrona para Coleta de Sangue Supra - V1 - 02/2021

O conteúdo desta publicação não pode ser copiado, total ou parcialmente,
sem o consentimento da **Supra Steel.**