

INSTRUÇÕES DE USO

SUPOORTE PARA SORO SUPRA



**ATENÇÃO!**


ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO, LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL.

1. Produto	1
2. Instruções de segurança	2
2.1. Precauções	2
2.2. Cuidados de transporte e armazenamento	2
3. Instalação	3
3.1. Preparo	3
3.2. Montagem	3
3.2.1. Peças do Suporte Acoplado	3
3.2.2. Passo a passo de montagem do suporte acoplado	3
4. Instruções de uso	4
4.1. Como regular a altura do Suporte para Soro	4
5. Manutenção	4
5.1. Limpeza e conservação	4
5.2. Manutenção preventiva	4
5.3. Assistência técnica	4
6. Fabricante	5
6.1. Informações do fabricante	5
7. Garantia	5
7.1. Validade da garantia	5
7.2. Condições de garantia	5
7.3. Outras informações sobre garantia e assistência técnica	5
Formulário de Informações da Garantia	6


NOME COMERCIAL		Suporte para Soro Supra
CARACTERÍSTICAS GERAIS: <ul style="list-style-type: none"> - Estrutura fabricada predominantemente em aço carbono ligas SAE 1010 e SAE 1020, que possui excelente composição química e propriedades mecânicas; - Estrutura com acabamento em pintura eletrostática BRANCA; - Sistema regulável. 		
EMBALAGEM: <ul style="list-style-type: none"> - Produto embalado com plástico bolha, papelão ondulado e filme <i>stretch</i>. 		
MEDIDAS	BASE DE PISO	Largura: 44,5cm Altura mínima: 190cm Altura máxima: 215cm
	BASE ACOPLADA	Largura: 20cm Altura mínima: 120cm Altura máxima: 145cm
MECANISMO		Manual
PESO MÁXIMO		5Kg
AMBIENTE		Produto destinado para uso em ambiente interno: hospitais e clínicas
USO		Suporte para bolsas de soro e medicamentos
USUÁRIO		Adultos
OPERAÇÃO		Adultos estão aptos a operar a cama após lerem as instruções deste manual.
PRAZO DE VALIDADE		Indeterminado

2. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA


2.1. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

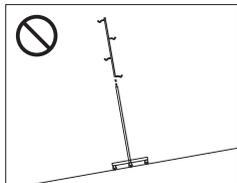


→ **NÃO** utilize em piso inclinado

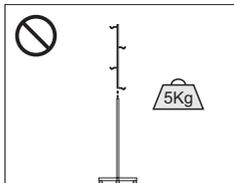


→ **NÃO** ultrapasse a carga máxima permitida

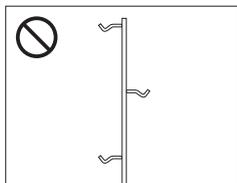

→ **NÃO** concentre a carga máxima em único gancho

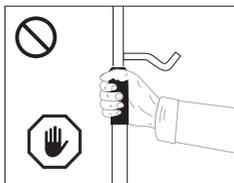

→ **NÃO** aperte o manípulo de regulagem mais que o necessário

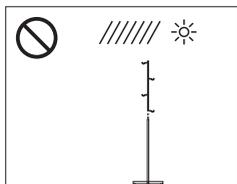

→ **NÃO** exponha o produto ao sol ou intempéries




ATENÇÃO!

Faça inspeções mensais no equipamento e a qualquer sinal de defeito suspenda o uso e entre em contato com a **SUPRA STEEL**

2.2. ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE



Armazene ao abrigo da umidade

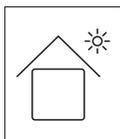


Evite exposição direta ao sol por longos períodos



Mantenha longe de produtos corrosivos

SIGA AS RECOMENDAÇÕES DA EMBALAGEM:

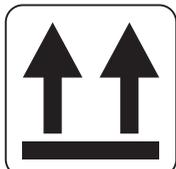

PARA CIMA



MANTENHA SECO




FRÁGIL

3.1. PREPARO


- O preparo do produto deverá ser feito em superfície limpa e plana (você pode utilizar a embalagem para forrar o piso para proteger a superfície e o produto).
- Cuidado com objetos cortantes ou perfurantes na remoção de lacres (fitas tipo hellermann). O produto pode ser danificado.
- **NÃO UTILIZE FIOS OU QUALQUER MATERIAL DE AMARRAÇÃO, PRINCIPALMENTE NOS MECANISMOS E ARTICULAÇÕES, ISSO PODE DANIFICAR O PRODUTO.**

3.2. MONTAGEM


3.2.1. PEÇAS DO SUPORTE ACOPLADO

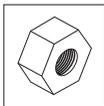


PORCA

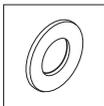

ARRUELA

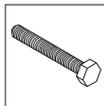


PARAFUSO

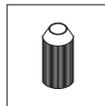


BUCHA
(parte superior)



BUCHA
(parte inferior)

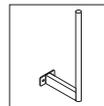


BASE DO
SUPORTE
PARA SORO
ACOPLADO

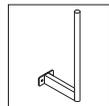


CABIDE

3.2.2. PASSO A PASSO DE MONTAGEM DO SUPORTE ACOPLADO

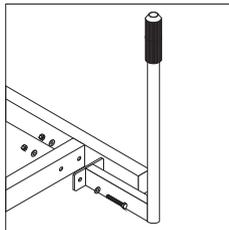


- 1 - Eleve o leito da cabeceira da cama;
- 2 - Encaixe duas das arruelas nos dois parafusos (uma em cada);
- 3 - Encaixe os parafusos (com arruelas) na base do suporte para soro;

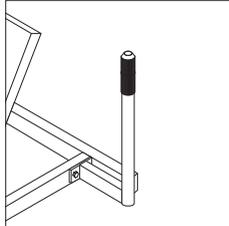

- 4 - Encaixe os parafusos e o suporte nos furos do chassi;
- 5 - Encaixe as outras duas arruelas pela parte de dentro do chassi;
- 6 - Encaixe as porcas nos parafusos;
- 7 - Rosqueie os parafusos e as porcas;


- 8 - Certifique-se de que o suporte está bem preso à cama;

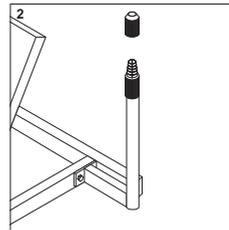

- 9 - Desrosqueie e remova a parte superior da bucha do suporte para soro;



- 10 - Encaixe a parte superior da bucha no cabide do suporte de soro;
- 11 - Insira o cabide do suporte de soro com a bucha na base;

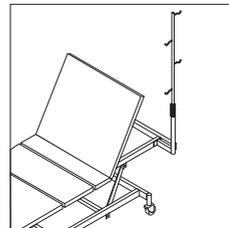


- 12 - Regule a altura desejada;
- 13 - Rosqueie a parte superior da bucha na parte inferior;



ATENÇÃO!

Não utilize o produto sem que correta montagem tenha sido realizada.
Qualquer sinal de defeito suspenda o uso e entre em contato com a **SUPRA STEEL**

4.1. COMO REGULAR A ALTURA DO SUPORTE

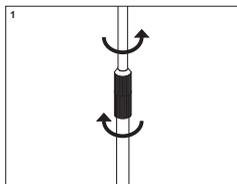

- Desrosqueie a parte superior com relação à parte inferior da bucha do suporte;
- Ajuste na altura desejada;



- Rosqueie novamente para travar;
- Não aperte mais que o necessário, isso pode danificar o produto.

5. MANUTENÇÃO

5.1. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

- Utilize um pano umedecido com água e sabão neutro para executar a limpeza e, em seguida, passe um pano seco e macio para enxugar;
- Não utilize produtos químicos corrosivos ou abrasivos;

5.2. MANUTENÇÃO PREVENTIVA

- Lubrifique mecanismos e articulações da cama pelo menos 1 (uma) vez ao mês. Recomenda-se o uso de desengripante.
- Em região litorânea a frequência de lubrificação deve ser a cada 15 (quinze) dias.



ATENÇÃO!

Faça inspeções mensais no equipamento e a qualquer sinal de defeito suspenda o uso e entre em contato com a **SUPRA STEEL**

5.3. ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Entre em contato com a **SUPRA STEEL** *



(41) 3663-7507 / 3663-8265



Rua Ângela Guidolin da Silva, n.º 35, barracões 23, 24 e 25
Centro - CEP 83414-070 - Colombo-PR -



assistencia@suprasteel.com.br



de segunda a quinta das 08:00 às 17:00 / sextas-feiras das 08:00 às 16:00

*Tenha em mãos a Nota Fiscal de compra do produto (caso seja necessário obter a segunda via, entre em contato com a loja onde foi efetuada a compra).

6.1. INFORMAÇÕES DO FABRICANTE

Metalúrgica Supra Stell Ltda.
CNPJ 32.330.070/0001-02
Rua Ângela Guidolin da Silva, nº 35 - Centro
CEP. 83.414.070 - Colombo/Paraná
Telefone: (41) 3663-7507
Responsável Técnico: Moyses Maia Viana - CREA-PR: 171142/D
AFE N.º 8.20.987-1

6.1 VALIDADE DA GARANTIA

A **SUPRA STEEL** oferece garantia de:

- 12 (doze) meses para partes metálicas, mecanismos e acessórios;

Asseguramos total garantia contra defeitos de fabricação durante o período supra citado;

O prazo começa a contar a partir da data de recebimento do produto;

A nota fiscal é um documento imprescindível para qualquer procedimento relacionado a cobertura de garantia e assistência técnica;

Ainda que a garantia tenha sido expirada, seu produto poderá receber assistência técnica seguindo critérios e valores a serem analisados por nossos colaboradores;

Ao primeiro sinal de qualquer tipo de problema ou dúvida com relação ao funcionamento do produto entre em contato com nosso departamento responsável por assistência técnica (vide contato no campo "assistência técnica").

6.2 CONDIÇÕES DA GARANTIA

IMPLICAM PERDADA GARANTIA:

- Qualquer dano causado por reparos e alterações conduzidas pelo cliente ou técnico não autorizado;
- Inobservância das instruções e precauções indicadas neste manual;
- Uso de produtos químicos, corrosivos ou abrasivos;
- Exposição a intempéries ou calor e umidade excessivos;
- Perfurações, riscos, amassamentos, quebras, rompimentos, corrosões e quaisquer danos ocasionados por mau uso.

6.3 OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

- Caso a cobertura da garantia tenha expirado, a manutenção será feita através de avaliação e orçamento, com valores a serem aprovados e pagos pelo cliente;
- Podem haver situações em que o problema poderá ser solucionado sem a necessidade de envio do produto para o fabricante. Nestes casos, as peças a serem substituídas serão enviadas, assim como um técnico será acionado para realizar o serviço (o que será analisado pelo departamento responsável);
- A **SUPRA STEEL** não se responsabiliza pela disponibilização de produto reserva durante o período de manutenção;
- A garantia e manutenção de algumas peças como, por exemplo, os motores e atuadores dependem da análise e garantia do fornecedor. Neste caso, é o próprio fornecedor quem estipula o prazo para manutenção.



FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES DE GARANTIA SUPRA STEEL

Esses são os dados que vamos precisar em caso de acionamento de assistência técnica:

Nome: _____

Telefone: _____

Endereço: _____

E-mail: _____

Data da compra: _____

Nome do revendedor: _____

Telefone do revendedor: _____

Número da nota fiscal: _____

Número do lote: _____

IMPORTANTE:

Guarde esse certificado de garantia em local seguro para referência futura.
Recomenda-se anexar a nota fiscal a este formulário.

MODELOS DISPONÍVEIS

Suporte para Soro Supra - base de piso
Suporte para Soro Supra - base acoplada

Metalúrgica Supra Steel Ltda.
CNPJ 32.330.070/0001-02
Telefones: (41) 3663-7507 / (41) 3663-8265
Rua Ângela Guidolin da Silva, 35 - Barracões 23, 24 e 25
Centro - CEP: 83.414-070 - Colombo - PR
AFE N.º 8.20.987-1

Suporte para Soro Supra - V1 - 02/2021
Projeto: Suporte para Soro Supra - V1 - 02/2021

O conteúdo desta publicação não pode ser copiado, total ou parcialmente,
sem o consentimento da **Supra Steel**.