


# INSTRUÇÕES DE USO

## CARRO MACA HOSPITALAR SUPRA

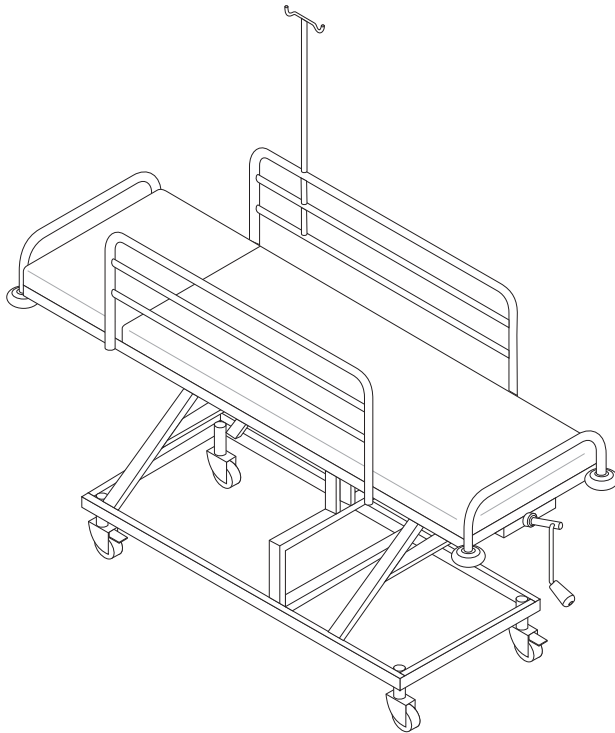



## **ATENÇÃO!**

**ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO, LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL.**


<b>1. Produto</b> .....	<b>1</b>
1.1. Ficha técnica Carro Maca Hospitalar Supra .....	1
1.2. Ficha técnica Carro Maca Hospitalar Supra - Tipo Padiola .....	2
<b>2. Instruções de segurança</b> .....	<b>3</b>
2.1. Precauções .....	3
2.2. Cuidados de transporte e armazenamento .....	3
<b>3. Instalação</b> .....	<b>4</b>
3.1. Preparo .....	4
<b>4. Instruções de uso</b> .....	<b>4</b>
4.1. Como elevar/abaixar o leito cabeceira .....	4
4.2. Como elevar/abaixar a plataforma do leito .....	4
4.3. Como elevar/abaixar a grade lateral .....	4
4.4. Como encaixar o suporte para soro .....	4
<b>5. Manutenção</b> .....	<b>5</b>
5.1. Limpeza e conservação .....	5
5.2. Manutenção preventiva .....	5
5.3. Assistência técnica .....	5
<b>6. Fabricante</b> .....	<b>5</b>
6.1. Informações do fabricante .....	5
<b>7. Garantia</b> .....	<b>6</b>
7.1. Validade da garantia .....	6
7.2. Condições de garantia .....	6
7.3. Outras informações sobre garantia e assistência técnica .....	6
<b>Formulário de Informações da Garantia</b> .....	<b>7</b>

NOME COMERCIAL	Carro Maca Hospitalar Supra
<p><b>CARACTERÍSTICAS GERAIS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Estrutura fabricada predominantemente em aço carbono ligas SAE 1010 e SAE 1020, que possui excelente composição química e propriedades mecânicas;</li> <li>- Estrutura com acabamento em pintura eletrostática BRANCA;</li> <li>- Sistema articulável;</li> </ul> <p><b>EMBALAGEM:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Produto embalado com plástico bolha, papelão ondulado e filme <i>stretch</i>.</li> </ul>	
MEDIDAS	Largura: 55cm Comprimento: 186cm Altura sem rodízios: 75cm Altura com rodízios: 85cm
MECANISMO	Cremalheira
PESO MÁXIMO	130Kg
AMBIENTE	Produto destinado para uso em ambiente interno: hospitais, clínicas, consultórios.
USO	Transporte de paciente e exames clínicos
USUÁRIO	Adultos
OPERAÇÃO	Adultos estão aptos a operar a cama após lerem as instruções deste manual.
PRAZO DE VALIDADE	Indeterminado
OPCIONAIS	Leito estofado Leito chapa inox Leito chapa pintada  Sem grade lateral Grade lateral pendular tipo 1 (meio em "U") Grade lateral pendular tipo 2 (meio com travessas horizontais)  Rodízios  Suporte para soro  Suporte para papel  Reforçada para obeso (até 2200 Kg)


NOME COMERCIAL		Carro Maca Hospitalar Supra - TIPO PADIOLA
<b>CARACTERÍSTICAS GERAIS:</b> - Estrutura fabricada predominantemente em aço carbono ligas SAE 1010 e SAE 1020, que possui excelente composição química e propriedades mecânicas; - Estrutura com acabamento em pintura eletrostática BRANCA; - Sistema articulável;		
<b>EMBALAGEM:</b> - Produto embalado com plástico bolha, papelão ondulado e filme <i>stretch</i> .		
MEDIDAS		Largura: 60cm Comprimento: 190cm Altura mínima: 67cm Altura máxima: 92cm
MECANISMO	LEITO	Cremalheira
	ELEVAÇÃO	Manivela
PESO MÁXIMO		130Kg
AMBIENTE		Produto destinado para uso em ambiente interno: hospitais, clínicas, consultórios.
USO		Transporte de paciente e exames clínicos
USUÁRIO		Adultos
OPERAÇÃO		Adultos estão aptos a operar a cama após lerem as instruções deste manual.
PRAZO DE VALIDADE		Indeterminado
OPCIONAIS		Leito estofado Leito chapa inox Leito chapa pintada  Suporte para soro  Reforçada para obeso (até 2200 Kg)

## 2. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA


### 2.1. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

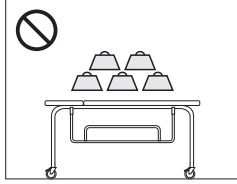


→ **NÃO** ultrapasse a carga máxima permitida

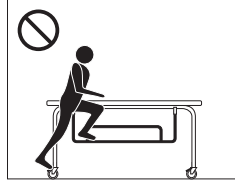


→ **NÃO** utilize as grades como apoio para levantar ou para subir na maca hospitalar

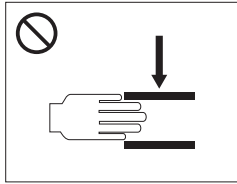


→ **NÃO** coloque as mãos embaixo do leito

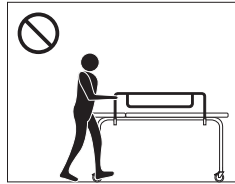


→ **NÃO** movimente o carro maca hospitalar usando como pegador a grade lateral

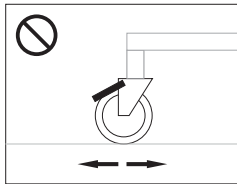

→ **NÃO** movimente o carro maca com os freios acionados

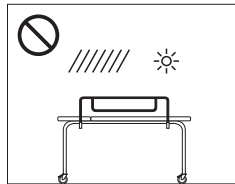

→ **NÃO** exponha o produto ao sol ou intempéries

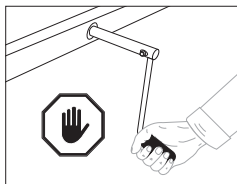

→ **NÃO** não force a manivela ao chegar no fim do curso




### **ATENÇÃO!**

Faça inspeções mensais no equipamento e a qualquer sinal de defeito suspenda o uso e entre em contato com a **SUPRA STEEL**


### 2.2. ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE



Armazene ao abrigo da umidade

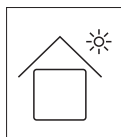

Evite exposição direta ao sol por longos períodos

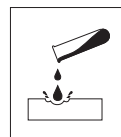

Mantenha longe de produtos corrosivos


## 3.1. PREPARO

- O preparo do produto deverá ser feito em superfície limpa e plana (você pode utilizar a embalagem para forrar o piso para proteger a superfície e o produto).
- Cuidado com objetos cortantes ou perfurantes na remoção de lacres (fitas tipo hellermann). O produto pode ser danificado.
- **NÃO UTILIZE FIOS OU QUALQUER MATERIAL DE AMARRAÇÃO, PRINCIPALMENTE NOS MECANISMOS E ARTICULAÇÕES, ISSO PODE DANIFICAR O PRODUTO.**


\*Não é necessário nenhum procedimento de montagem para este produto.

# 4. INSTRUÇÕES DE USO

## 4.1. COMO ELEVAR/ABAIXAR O LEITO CABECEIRA

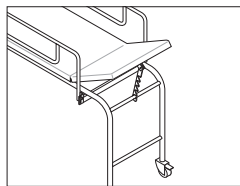


- Para elevar o leito puxe-o;
- Encaixe a cremalheira na barra conforme posição desejada;
- Verifique se está travado;

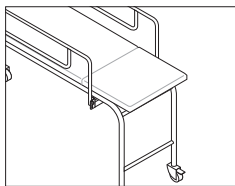




- Para baixá-lo novamente: puxe o leito para cima e a cremalheira braço em direção ao leito segurando-o e abaixando lentamente;
- Verifique se está travado.

## 4.2. COMO ELEVAR/ABAIXAR A PLATAFORMA

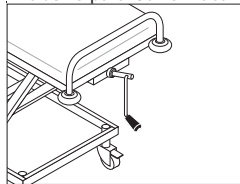Exclusivo para Carro Maca Hospitalar Supra - Tipo Padiola




- Para elevar ou abaixar a plataforma do leito, gire a manivela.


- Gire a manivela no sentido horário para elevar 
- Gire a manivela no sentido anti-horário para baixar 
- Pare de girar a manivela ao finalizar o movimento 

## 4.3. COMO ELEVAR/ABAIXAR A GRADE LATERAL

Aplicável para grade lateral pendular tipos 1 e 2

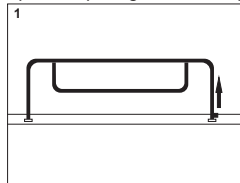


- Puxe a grade lateral pendular para cima até o limite máximo;
- Puxe-a para frente e para baixo até que ela gire 180°.

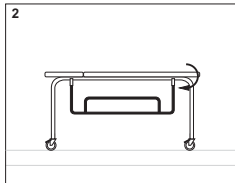


- Para voltar à posição de origem puxe-a para frente e para cima até que gire 180°;
- Empurre-a para baixo travando no suporte.

## 4.4. COMO ENCAIXAR O SUPORTE PARA SORO

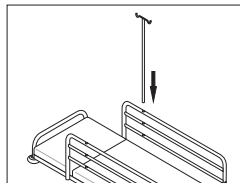

- Direcione a haste principal do suporte para soro na furação da grade lateral pendular tipo 2;
- Passe a haste pela furação dos 3 tubos, até que esteja apoiada;

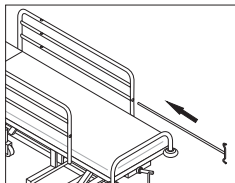

- Quando não estiver utilizando o suporte para soro, pode deixá-lo acoplado ao tubo horizontal. basta encaixá-lo na furação lateral da grade.

### 5.1. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

- Utilize um pano umedecido com água e sabão neutro para executar a limpeza e, em seguida, passe um pano seco e macio para enxugar;

- Não utilize produtos químicos corrosivos ou abrasivos;

ESTOFADO:

- A limpeza deve ser feita com pano umedecido com água e detergente neutro;

- Recomenda-se girar o colchão no sentido horizontal a cada 3 (três) meses de uso;

- Não expor o colchão ao sol e intempéries.

### 5.2. MANUTENÇÃO PREVENTIVA

- Lubrifique mecanismos e articulações da cama pelo menos 1 (uma) vez ao mês. Recomenda-se o uso de desengripante.

- Em região litorânea a frequência de lubrificação deve ser a cada 15 (quinze) dias.



### **ATENÇÃO!**

Faça inspeções mensais no equipamento e a qualquer sinal de defeito suspenda o uso e entre em contato com a **SUPRA STEEL**

### 5.3. ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Entre em contato com a **SUPRA STEEL** \*



(41) 3663-7507 / 3663-8265



Rua Ângela Guidolin da Silva, n.º 35, barracões 23, 24 e 25  
Centro - CEP 83414-070 - Colombo-PR -



assistencia@suprasteel.com.br



de segunda a quinta das 08:00 às 17:00 / sextas-feiras das 08:00 às 16:00

\***Tenha em mãos a Nota Fiscal de compra do produto** (caso seja necessário obter a segunda via, entre em contato com a loja onde foi efetuada a compra).

## 6. FABRICANTE

### 6.1. INFORMAÇÕES DO FABRICANTE

Metalúrgica Supra Stell Ltda.

CNPJ 32.330.070/0001-02

Rua Ângela Guidolin da Silva, n.º 35 - Centro

CEP. 83.414.070 - Colombo/Paraná

Telefone: (41) 3663-7507

Responsável Técnico: Moyses Maia Viana - CREA-PR: 171142/D

AFE N.º 8.20.987-1

### 7.1 VALIDADE DA GARANTIA

A **SUPRA STEEL** oferece garantia de:

- 1 (um) ano para partes metálicas, mecanismos e acessórios;
- 6 (seis) meses para colchões;
- 90 (noventa) dias para capas de colchões;

Asseguramos total garantia contra defeitos de fabricação durante o período supra citado;

O prazo começa a contar a partir da data de recebimento do produto;

A nota fiscal é um documento imprescindível para qualquer procedimento relacionado a cobertura de garantia e assistência técnica;

Ainda que a garantia tenha sido expirada, seu produto poderá receber assistência técnica seguindo critérios e valores a serem analisados por nossos colaboradores;

Ao primeiro sinal de qualquer tipo de problema ou dúvida com relação ao funcionamento do produto entre em contato com nosso departamento responsável por assistência técnica (vide contato no campo “assistência técnica”).

### 7.2 CONDIÇÕES DA GARANTIA

#### IMPLICAM PERDA DA GARANTIA:

- Qualquer dano causado por reparos e alterações conduzidas pelo cliente ou técnico não autorizado;
- Inobservância das instruções e precauções indicadas neste manual;
- Uso de produtos químicos, corrosivos ou abrasivos;
- Exposição a intempéries ou calor e umidade excessivos;
- Perfurações, riscos, amassamentos, quebras, rompimentos, corrosões e quaisquer danos ocasionados por mau uso.

### 7.3 OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

- Caso a cobertura da garantia tenha expirado, a manutenção será feita através de avaliação e orçamento, com valores a serem aprovados e pagos pelo cliente;
- Podem haver situações em que o problema poderá ser solucionado sem a necessidade de envio do produto para o fabricante. Nestes casos, as peças a serem substituídas serão enviadas, assim como um técnico será acionado para realizar o serviço (o que será analisado pelo departamento responsável);
- A **SUPRA STEEL** não se responsabiliza pela disponibilização de cama reserva durante o período de manutenção;
- A garantia e manutenção de algumas peças como, por exemplo, os motores e atuadores dependem da análise e garantia do fornecedor. Neste caso, é o próprio fornecedor quem estipula o prazo para manutenção.





## FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES DE GARANTIA **SUPRA STEEL**

Esses são os dados que vamos precisar em caso de acionamento de assistência técnica:

Nome: \_\_\_\_\_

Telefone: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

Data da compra: \_\_\_\_\_

Nome do revendedor: \_\_\_\_\_

Telefone do revendedor: \_\_\_\_\_

Número da nota fiscal: \_\_\_\_\_

Número do lote: \_\_\_\_\_

### **IMPORTANTE:**

Guarde esse certificado de garantia em local seguro para referência futura.  
Recomenda-se anexar a nota fiscal a este formulário.

