


INSTRUÇÕES DE USO

CAMA MANUAL PARA PARTO PPP SUPRA 305

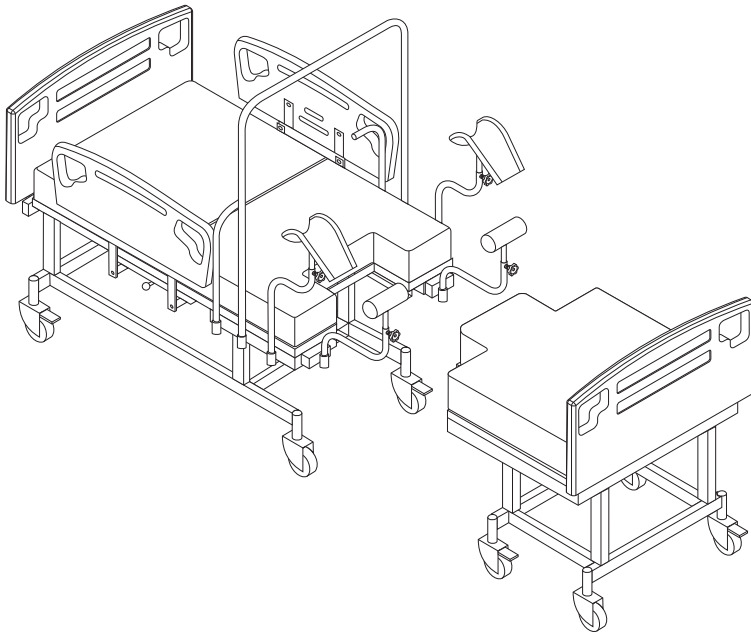


**ATENÇÃO!****ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO, LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL.**

1. Produto	1
2. Instruções de segurança	2
2.1. Precauções	2
2.2. Cuidados de transporte e armazenamento	2
3. Instalação	3
3.1. Preparo	3
3.2. Partes da Cama PPP	3
3.3. Como montar a cabeceira/peseira injetada	3
4. Instruções de uso	4
4.1. Como elevar/baixar o leito cabeceira	4
4.2. Como baixar/levantar a grade lateral	4
4.3. Como encaixar e fixar os acessórios	4
4.4. Como acoplar e travar a mesa complementar e a cama	4
4.5. Como encaixar a bacia de inox na cama	4
4.6. Como fixar o colchão	4
5. Manutenção	5
5.1. Limpeza e conservação	5
5.2. Manutenção preventiva	5
5.3. Assistência técnica	5
6. Fabricante	5
6.1. Informações do fabricante	5
7. Garantia	6
7.1. Validade da garantia	6
7.2. Condições de garantia	6
7.3. Outras informações sobre garantia e assistência técnica	6
Formulário de Informações da Garantia	7


NOME COMERCIAL		Cama Manual Para Parto PPP Supra 305	
CARACTERÍSTICAS GERAIS: <ul style="list-style-type: none"> - Estrutura fabricada predominantemente em aço carbono ligas SAE 1010 e SAE 1020, que possui excelente composição química e propriedades mecânicas; - Leitos e estrutura com acabamento em pintura eletrostática BRANCA; - Sistema articulável. 			
EMBALAGEM: <ul style="list-style-type: none"> - Produto embalado com plástico bolha, papelão ondulado e filme <i>stretch</i>. 			
PÉS		Com rodízios de 3" com e sem freio intercalados - em diagonal	
CABECEIRA/PESEIRA		- Injetada (em PEAD)	
GRADES LATERAIS		- Injetada (em PEAD) - acionamento tipo circular	
LEITOS		<ul style="list-style-type: none"> - Chapa inteiriça - Tipo estrado (com respiro) 	
MEDIDAS	TOTAIS	Largura: 99cm Comprimento: 205cm Altura: 156cm (considerando o arco pegador)	
	LEITO	Altura do leito: 64,5cm Largura do leito: 80cm Comprimento do leito: 190cm	
INCLINAÇÃO DOS LEITOS		dorsal: 0 / 28 / 50 / 66°	
POSIÇÕES			
MECANISMO		Manual com cremalheira	
PESO MÁXIMO		130Kg	
AMBIENTE		Produto destinado para uso em ambiente interno: hospitais e clínicas	
USO		Produto estacionário. Não use para transporte de paciente.	
USUÁRIO		Adultos	
OPERAÇÃO		Adultos estão aptos a operar a cama após lerem as instruções deste manual.	
PRAZO DE VALIDADE		Indeterminado	
ACESSÓRIOS INCLUSOS		Arco pegador, suportes com perneira, suporte 'L', suportes com apoio para pés e bacia de inox	

2. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

2.1. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

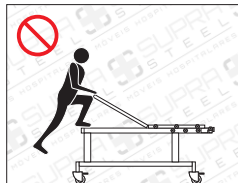


→ **NÃO** realize esforços sobre o leito quando este estiver elevado.
→ **NÃO** sente na peseira quando estiver elevada.

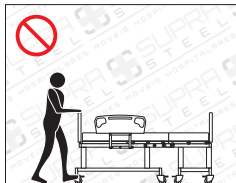


→ **NÃO** movimente a cama utilizando como pegador: grades, cabeceira ou peseira.




→ **NÃO** utilize grades, cabeceira ou peseira como apoio para levantar ou para subir na cama.

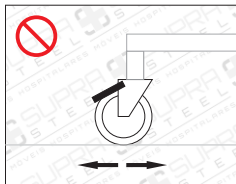


→ **NÃO** movimente a cama com os freios dos rodízios acionados.

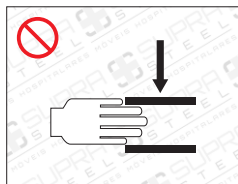

→ **NÃO** coloque as mãos embaixo do leito.

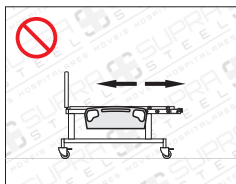

→ **NÃO** movimente a cama nem os leitos quando a grade lateral estiver abaixada.

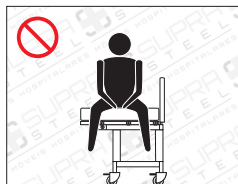

→ **NÃO** sente na mesa complementar quando ela estiver desconectada da cama, pois há risco de tombamento.



ATENÇÃO!

Faça inspeções mensais no equipamento e a qualquer sinal de defeito suspenda o uso e entre em contato com a **SUPRA STEEL**


2.2. ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE




Armazene ao abrigo da umidade



Evite exposição direta ao sol por longos períodos

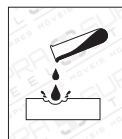

Mantenha longe de produtos corrosivos

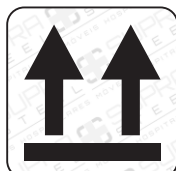

PARA CIMA



NÃO INCLINE



MANTENHA SECO




FRÁGIL


3.1. PREPARO

- O preparo do produto deverá ser feito em superfície limpa e plana (você pode utilizar a embalagem para forrar o piso para proteger a superfície e o produto).
- Cuidado com objetos cortantes ou perfurantes na remoção de lacres (fitas tipo hellermann). O produto pode ser danificado.
- **NÃO UTILIZE FIOS OU QUALQUER MATERIAL DE AMARRAÇÃO, PRINCIPALMENTE NOS MECANISMOS E ARTICULAÇÕES, ISSO PODE DANIFICAR O PRODUTO.**


3.2. PARTES DA CAMA PPP

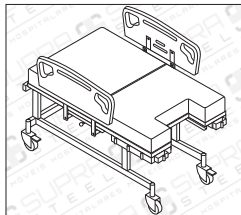


1 (uma) cama PPP manual

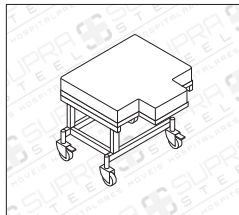


1 (uma) mesa complementar

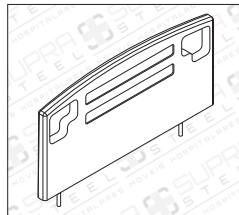


2 (duas) cabeceira/pesseira

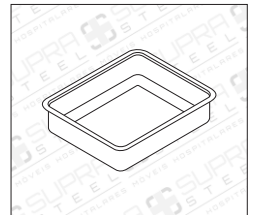


1 (uma) bacia inox

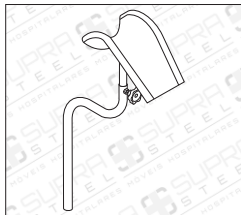


2 (dois) suportes com perneira

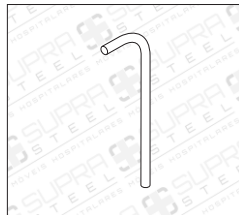

2 (dois) suportes "L"

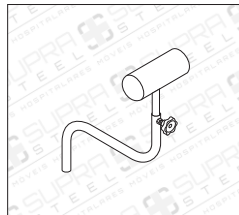


2 (dois) suportes com apoio para pés

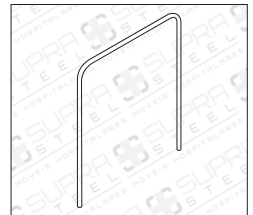


1 (um) arco pegador

3.3. MONTAGEM

COMO MONTAR A CABECEIRA/PESSEIRA INJETADA

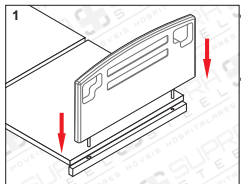

- Para encaixar a cabeceira ou a pesseira injetada, posicione a peça em direção a cama.
- Encaixe os pinos nos tubos até descer completamente.

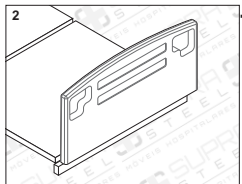

- A cabeceira / pesseira deve ficar encaixada desta maneira.




ATENÇÃO!


Não utilize o produto sem que correta montagem tenha sido realizada.
Qualquer sinal de defeito suspenda o uso e entre em contato com a **SUPRA STEEL**

4. INSTRUÇÕES DE USO

4.1. COMO ELEVAR / BAIXAR O LEITO CABECEIRA

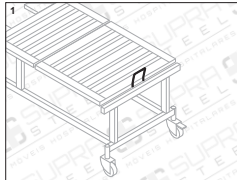


- Para elevar o leito puxe-o pela alça;
- Encaixe o braço na cremalheira conforme posição desejada;
- Verifique se está travado;

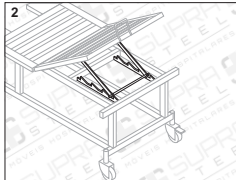


- Para baixá-lo novamente: puxe a alça do leito para cima e o braço em direção à cabeceira;
- Verifique se está travado.

4.2. COMO BAIXAR/LEVANTAR A GRADE LATERAL INJETADA

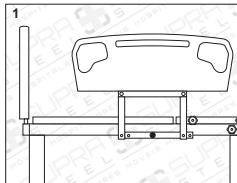


- Puxe o manípulo (esfera) na direção oposta da cama;
- Puxe a grade lateral em direção à cabeceira e para baixo, em movimento circular.

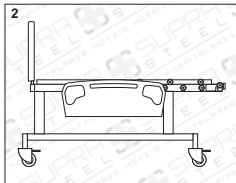


- Para voltar à posição de origem puxe-a em direção à cabeceira e para cima, em movimento circular.

4.3. COMO ENCAIXAR E FIXAR OS ACESSÓRIOS

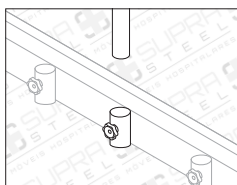


- Para encaixar os acessórios, desrosqueie o manípulo para afrouxar a abraçadeira;
- Insira o tubo na abraçadeira;
- Rosqueie o manípulo para apertar a abraçadeira e fixar o acessório.

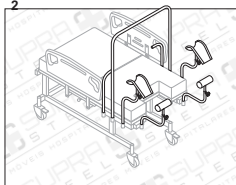


- Os acessórios podem ser encaixados nas posições indicadas na figura.

4.4. COMO ACOPLAR E TRAVAR A MESA COMPLEMENTAR E A CAMA

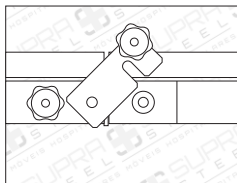


- Para acoplar e travar a mesa complementar na cama, aproxime-as e alinhe-as;
- Gire a trava para baixo, de modo que a abertura da chapa da cama encaixe no pino da mesa complementar.

4.5. COMO ENCAIXAR A BACIA DE INOX NA CAMA

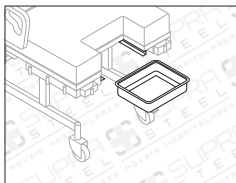


- Para encaixar a bandeja de inox, aproxime-a da cama e encaixe-a nos trilhos.

4.6. COMO FIXAR O COLCHÃO

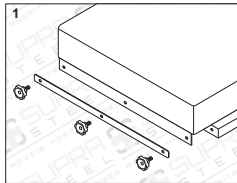

- Para fixar o colchão encaixe-o na cama, alinhando os furos do colchão aos furos da cama;
- Coloque a chapa de fixação, alinhando os furos da chapa aos furos do colchão;

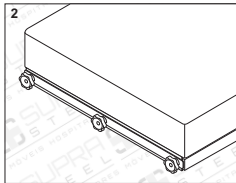

- Encaixe os manípulos e rosqueie.

*É necessário remover o colchão e limpar as partes metálicas após cada uso (verifique as instruções para limpeza e conservação).

ATENÇÃO!

As grades laterais têm a função de proteção do acamado durante a movimentação da cama. Portanto, mantenha-nas elevadas para evitar quedas e não as utilize como apoio ou pegador.

A inobservância dessas instruções pode resultar em lesão no usuário ou em terceiros.

Além da **PERDA DA GARANTIA**.



5.1. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

- Utilize um pano umedecido com água e sabão neutro para executar a limpeza e, em seguida, passe um pano seco e macio para enxugar;

- Não utilize produtos químicos corrosivos ou abrasivos;

COLCHÃO:

- A limpeza deve ser feita com pano umedecido com água e detergente neutro;

- Não expor o colchão ao sol e intempéries.

5.2. MANUTENÇÃO PREVENTIVA

- Lubrifique mecanismos e articulações da cama pelo menos 1 (uma) vez ao mês. Recomenda-se o uso de desengripante.

- Em região litorânea a frequência de lubrificação deve ser a cada 15 (quinze) dias.

**ATENÇÃO!**

Faça inspeções mensais no equipamento e a qualquer sinal de defeito suspenda o uso e entre em contato com a **SUPRA STEEL**

5.3. ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Entre em contato com a **SUPRA STEEL** *



(41) 3663-7507 / 3663-8265



Rua Ângela Guidolin da Silva, n.º 35, barracões 23, 24 e 25
Centro - CEP 83414-070 - Colombo-PR -



assistencia@suprasteel.com.br



de segunda a quinta das 08:00 às 17:00 / sextas-feiras das 08:00 às 16:00

***Tenha em mãos a Nota Fiscal de compra do produto** (caso seja necessário obter a segunda via, entre em contato com a loja onde foi efetuada a compra).

6. FABRICANTE**6.1. INFORMAÇÕES DO FABRICANTE**

Metalúrgica Supra Steel Ltda.

CNPJ 32.330.070/0001-02

Rua Ângela Guidolin da Silva, n° 35 - Centro

CEP. 83.414.070 - Colombo/Paraná

Telefone: (41) 3663-7507

Responsável Técnico: Moyses Maia Viana - CREA-PR: 171142/D

AFE N.º 8.20.987-1

6.1 VALIDADE DA GARANTIA

A **SUPRA STEEL** oferece garantia de:

- 1 (um) ano para partes metálicas, mecanismos e acessórios;
- 6 (seis) meses para colchões;
- 90 (noventa) dias para capas de colchões;

Asseguramos total garantia contra defeitos de fabricação durante o período supra citado;

O prazo começa a contar a partir da data de recebimento do produto;

A nota fiscal é um documento imprescindível para qualquer procedimento relacionado a cobertura de garantia e assistência técnica;

Ainda que a garantia tenha sido expirada, seu produto poderá receber assistência técnica seguindo critérios e valores a serem analisados por nossos colaboradores;

Ao primeiro sinal de qualquer tipo de problema ou dúvida com relação ao funcionamento do produto entre em contato com nosso departamento responsável por assistência técnica (vide contato no campo “assistência técnica”).

6.2 CONDIÇÕES DA GARANTIA

IMPLICAM PERDA DA GARANTIA:

- Qualquer dano causado por reparos e alterações conduzidas pelo cliente ou técnico não autorizado;
- Inobservância das instruções e precauções indicadas neste manual;
- Uso de produtos químicos, corrosivos ou abrasivos;
- Exposição a intempéries ou calor e umidade excessivos;
- Perfurações, riscos, amassamentos, quebras, rompimentos, corrosões e quaisquer danos ocasionados por mau uso.

6.3 OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

- Caso a cobertura da garantia tenha expirado, a manutenção será feita através de avaliação e orçamento, com valores a serem aprovados e pagos pelo cliente;
- Podem haver situações em que o problema poderá ser solucionado sem a necessidade de envio do produto para o fabricante. Nestes casos, as peças a serem substituídas serão enviadas, assim como um técnico será acionado para realizar o serviço (o que será analisado pelo departamento responsável);
- A **SUPRA STEEL** não se responsabiliza pela disponibilização de cama reserva durante o período de manutenção;
- A garantia e manutenção de algumas peças como, por exemplo, os motores e atuadores dependem da análise e garantia do fornecedor. Neste caso, é o próprio fornecedor quem estipula o prazo para manutenção.



FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES DE GARANTIA SUPRA STEEL

Esses são os dados que vamos precisar em caso de acionamento de assistência técnica:

Nome: _____

Telefone: _____

Endereço: _____

E-mail: _____

Data da compra: _____

Nome do revendedor: _____

Telefone do revendedor: _____

Número da nota fiscal: _____

Número do lote: _____

IMPORTANTE:

Guarde esse certificado de garantia em local seguro para referência futura.
Recomenda-se anexar a nota fiscal a este formulário.

MODELOS DISPONÍVEIS

Cama Manual Para Parto - PPP Supra 305 - cabeceira injetada - grade lateral injetada acionamento circular - leito chapa
Cama Manual Para Parto - PPP Supra 305 - cabeceira injetada - grade lateral injetada acionamento circular - leito estrado

Metalúrgica Supra Steel Ltda.
CNPJ 32.330.070/0001-02
Telefones: (41) 3663-7507 / (41) 3663-8265
Rua Ângela Guidolin da Silva, 35 - Barracões 23, 24 e 25
Centro - CEP: 83.414-070 - Colombo - PR
AFE N.º 8.20.987-1
Registro: 82098710008

Cama Manual Para Parto PPP Supra 305 - V1 - 02/2021
Projeto: Cama Manual Para Parto PPP Supra 305 - V1 - 02/2021

O conteúdo desta publicação não pode ser copiado, total ou parcialmente,
sem o consentimento da **Supra Steel.**